


### ШАГ 1




Для сбора образца тампон-зондом из носоглотки, введите стерильный тампон-зонд в ноздрю пациента достигая задней поверхности носоглотки

### ШАГ 2

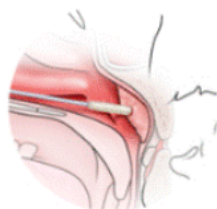

Плавнo проталкивайте тампон-зонд, пока не появится сопротивление на уровне носовой раковины. Медленно вращайте тампон 3-5 раз по задней поверхности носоглотки

### ШАГ 3

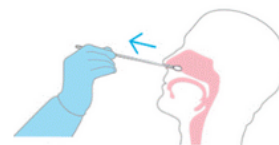

Осторожно удалите тампон-зонд из ноздри

### ШАГ 4

Добавьте 300 мкл (10 капель) буфера, входящего, в комплект поставки, в микропробирку 0,5 мл, тип Эппендорф

\*Если образец поступил уже в транспортной среде в Эппендорфе или транспортная среда уже расфасована в объеме 300-500 мкл, то пропустите этот шаг.

### ШАГ 5

Опустите тампон-зонд с мазком в микропробирку и не менее 5 раз вращайте его в буфере при этом, обтирая о внутренние стенки микропробирки тампон-зонд. Если конструкция тампон-зонда позволяет отломить кончик тампон-зонда с образцом, необходимо оставить его в буфере на 2 минуты при этом встряхнув его, не менее пяти раз в закрытой микропробирке

### ШАГ 6

Добавьте 80 мкл (3 капли из микропробирки), в окно картриджа «С». Оцените результат теста через 10-15 минут.

## ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВАЖНО: Интенсивность окрашивания полосок в тестовом окне, при **положительном** результате, может варьироваться в зависимости от количества нуклеокапсидного протеина антигена SARS-CoV-2 в образце. Любая слабоокрашенная линия(ии) в тестовом окне интерпретируются как положительные.

### ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ




ОДНА ОКРАШЕННАЯ ЛИНИЯ НАПРОТИВ ИНДИКАЦИИ «С» УКАЗЫВАЕТ НА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА.

### ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ



ДВЕ ОКРАШЕННЫЕ ЛИНИИ («С» КОНТРОЛЬНАЯ ЛИНИЯ И «Т» ТЕСТОВАЯ ЛИНИЯ) В ОКНЕ РЕЗУЛЬТАТА, УКАЗЫВАЮТ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА SARS-CoV-2.

### ОШИБОЧНЫЙ

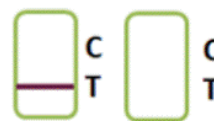

ЕСЛИ ОКРАШЕННАЯ ЛИНИЯ В КОНТРОЛЬНОМ ОКНЕ НАПРОТИВ ОБОЗНАЧЕНИЯ «С» НЕ ПОЯВИЛАСЬ, РЕЗУЛЬТАТ ОШИБОЧНЫЙ. ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ОШИБОЧНЫЙ, ПОВТОРИТЕ ТЕСТ ЕЩЕ РАЗ ИСПОЛЬЗУЯ ОСТАВШИЙСЯ ОБРАЗЕЦ.